



## medifa 4000 URO

Tables d'examen  
urologique



we care.

# medifa 4000 URO

- Design moderne et ergonomique
- Modèle haute qualité en acier inoxydable poli
- Possibilités optimales de nettoyage et de désinfection
- Concept de commande au pied convivial pour l'utilisateur
- Télécommande supplémentaire avec écran couleur (400550/570)
- Hauteur variable convenant aux personnes âgées et/ou handicapées
- 12 positions mémorisables / 4 niveaux d'utilisateurs
- Gains de temps grâce à la transmission simultanée des moteurs (positions mémorisées)
- Multiples choix de couleur
- Faible encombrement grâce au design compact
- Charge admissible de 200 kg



# medifa 4000 URO

## Table d'examen et de traitement

Réf. 400520

Avec les fonctions électriques suivantes:

- Réglage de la hauteur
- Réglage du dossier
- Réglage de la hauteur du bassin



## Accessoires représentés:

Réf. 40023

Coussin pour la tête

Réf. 81726\_1

Supports de pieds confort avec revêtement en cuir synthétique

Réf. 91706

Bassin à système de lavage gyroscopique avec arrivée et évacuation d'eau

## Table d'examen et de traitement

Réf. 400550

Avec les fonctions électriques suivantes:

- Réglage de la hauteur
- Réglage du dossier
- Réglage de la hauteur du bassin
- Possibilité de mémoriser et de rappeler 3 positions pour 4 utilisateurs



## Accessoires représentés:

Réf. 40023

Coussin pour la tête

Réf. 40000

Supplément pour revêtement laqué du socle selon le nuancier RAL

Réf. 42000

Revêtement de la colonne en acier inoxydable

Réf. 81717

Appui-jambes de Goepel avec revêtement en cuir synthétique

Réf. 91706

Bassin à système de lavage gyroscopique avec arrivée et évacuation d'eau

# medifa 4000 URO

## Table d'examen et de traitement

### Réf. 400570

- Réglage de la hauteur
- Réglage du dossier
- Réglage de la hauteur du bassin
- Réglage de l'appui-jambes
- Possibilité de mémoriser et de rappeler 3 positions pour 4 utilisateurs

## Accessoires représentés:

### Réf. 40023

Coussin pour la tête

### Réf. 81726\_2

Supports de pieds avec revêtement en cuir synthétique

### Réf. 91706

Bassin à système de lavage gyroscopique avec arrivée et évacuation d'eau



## Équipement de base

- Socle en fonte d'aluminium, revêtement de la colonne thermolaqué blanc (RAL 9010)
- Support du siège et châssis du dossier en acier inoxydable poli
- Commande électrique au pied facile à utiliser, séparée
- Possibilité supplémentaire de réglage électrique par télécommande avec écran couleur (Modèles 400550, 400570)
- Vis de compensation sur le socle permettant de sécuriser l'installation
- Parties rembourrées ergonomiques, épaisseur du coussin 50 mm
- Appui-tête et dossier rembourrés élaborés pour tenir le coussin pour la nuque avec une fixation magnétique
- Segments rembourrés avec revêtement plastique au dos
- Porte-rouleau de papier pour tenir le rouleau de papier (jusqu'à 500 mm) contre le dossier
- Papier déroulable sur le dossier et le coussin du siège ou bien uniquement sur le coussin du siège
- Dispositif de fixation pour rails lateraux 25 x 10 mm) pour montage d'accessoires, poignées, ainsi que dispositif de fixation pour appui-jambes de Goepel sur la section pelvienne
- Cuvette de récupération en plastique blanc, extensible, inclinable, amovible
- Charge admissible: 200 kg
- Poids du Table: 110 kg
- Encombrement: 860 x 550 mm
- Raccordement au réseau: 110/230 V / 50-60 Hz, avec câble d'alimentation de 3 m



# Modèles

# Confort et élégance



	Plage de réglage	400520	400550	400570
Réglage de la hauteur	550-900 mm	●	●	●
Réglage en hauteur avec bascule du bassin	230 mm		550 -1130 mm	
Réglage de la hauteur du bassin	+20°	●	●	●
Réglage du dossier	+50°	●	●	●
Réglage appui-jambes	30°	■	■	●
MEMORY (12 positions)			●	●
Télécommande		◆	●	●
Système de lavage		◆	◆	◆
Charge admissible		200 kg	200 kg	200 kg

● Électrique   ■ Manuel   ◆ En option

## Matelas

- Forme ergonomique du matelas
- Bords et angles arrondis
- Revêtement en cuir synthétique haute qualité
- Fabrication sans couture
- Possibilités optimales de nettoyage et de désinfection
- Différents coloris disponibles sans supplément
- Avec fixation magnétique du coussin de tête



# Fonctionnalité et design



# Fonctionnalité et design

Réglage électrique de la hauteur de 550 à 900 mm

Réglage électrique du système d'appui-jambes jusqu'à 30°

Réglage électrique de la hauteur du bassin jusqu'à + 20°

Réglage électrique du dossier jusqu'à + 50°

# Concept de manipulation

Pour en savoir plus sur les avantages du concept de commande medifa 4000, prenez l'exemple du modèle 400570.

- Manipulation intuitive et conviviale de la table, avec symboles et couleurs identiques sur les deux éléments
- Le grand écran couleur rétroéclairé de la télécommande montre le mouvement réalisé ainsi que le mode utilisateur choisi parmi 4 utilisateurs possibles
- La télécommande manuelle possède peu de boutons pour faciliter son utilisation, elle est très intuitive et ne nécessite aucune formation pour pouvoir l'utiliser
- Gain de temps grâce au fonctionnement synchrone des moteurs en mode mémoire
- Chaque fonction mémoire peut être stoppée à tout moment pour raison de sécurité
- Il y a en tout 3 mémoires de position possibles pour un total de quatre utilisateurs, soit 12 mémoires au total
- Chacune des trois mémoires de chaque utilisateur est directement accessible sur la commande au pied
- Bassin à système de lavage gyroscopique avec évacuation d'eau, arrivée d'eau par commande au pied

L'écran couleur éclairé indique

- de la position en cours,
- du mode utilisateur parmi les 4 disponibles,
- de la mémoire de position parmi les 12 disponibles

Double touche de fonction pour

- présélection des différentes fonctions
- présélection des positions de mémoire M1 à M3


LED d'information du moteur sélectionné

Touches de position de la fonction correspondante

Changement d'utilisateur parmi les 4 possibles

Rappel d'une position mémorisée

Programmation d'une mémoire de position (appui long sur cette touche)

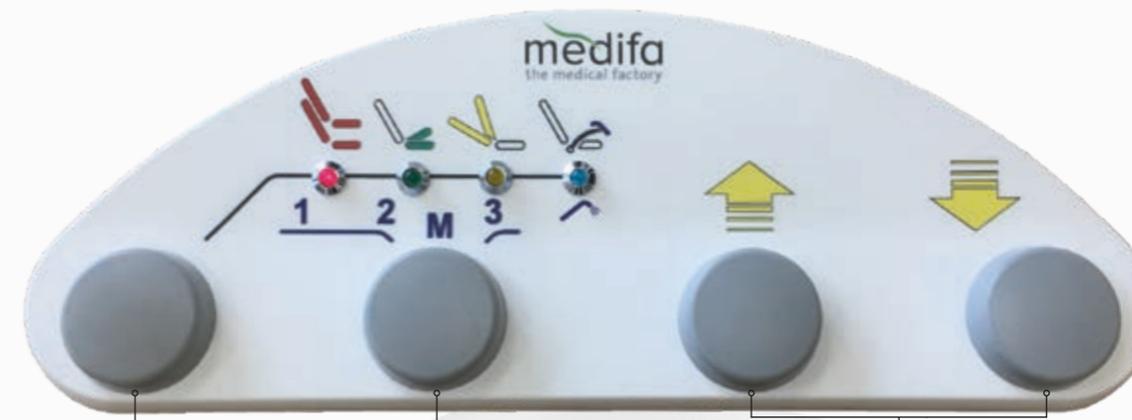

Double touche de fonction pour

- présélection des différentes fonctions
- présélection des positions de mémoire M1 à M3

Activation de l'une des trois mémoires accessibles directement au pied

Accès direct au réglage indépendant de la fonction sélectionnée, pour un ajustement fin de la position pour chaque patiente

## Flux de travail exemplaire à l'aide des fonctions de mémoire

M1



Position accueil

M2






Position de l'examen urologique

M3




Position de traitement urologique

# Caractéristiques techniques

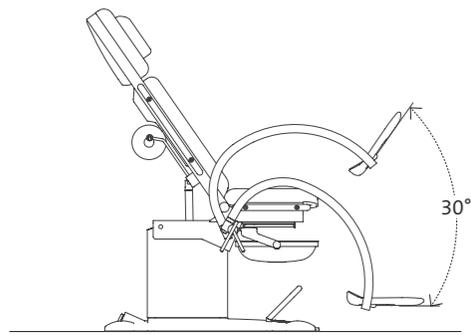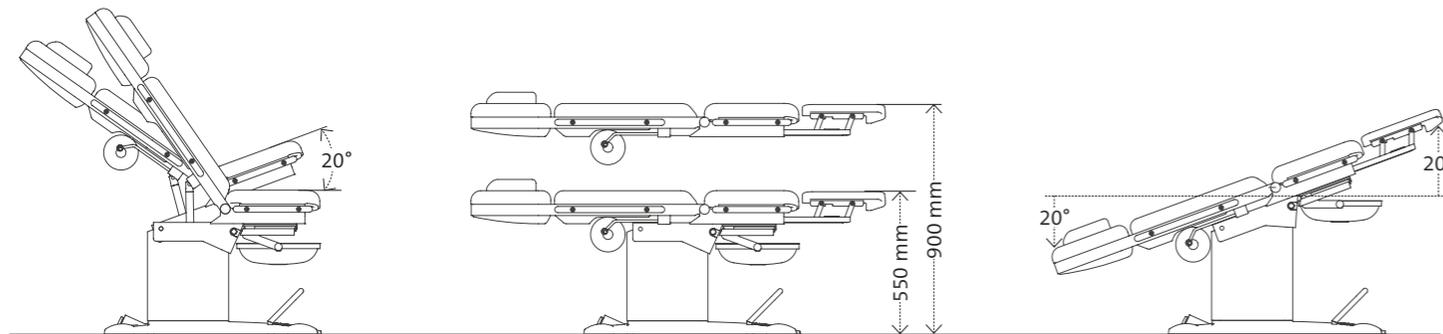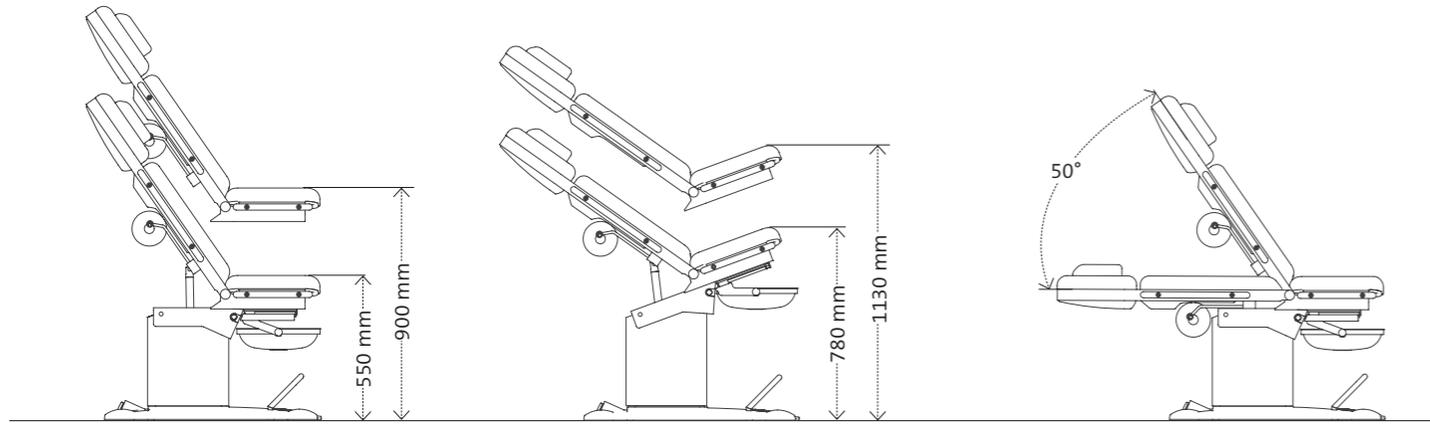

400570

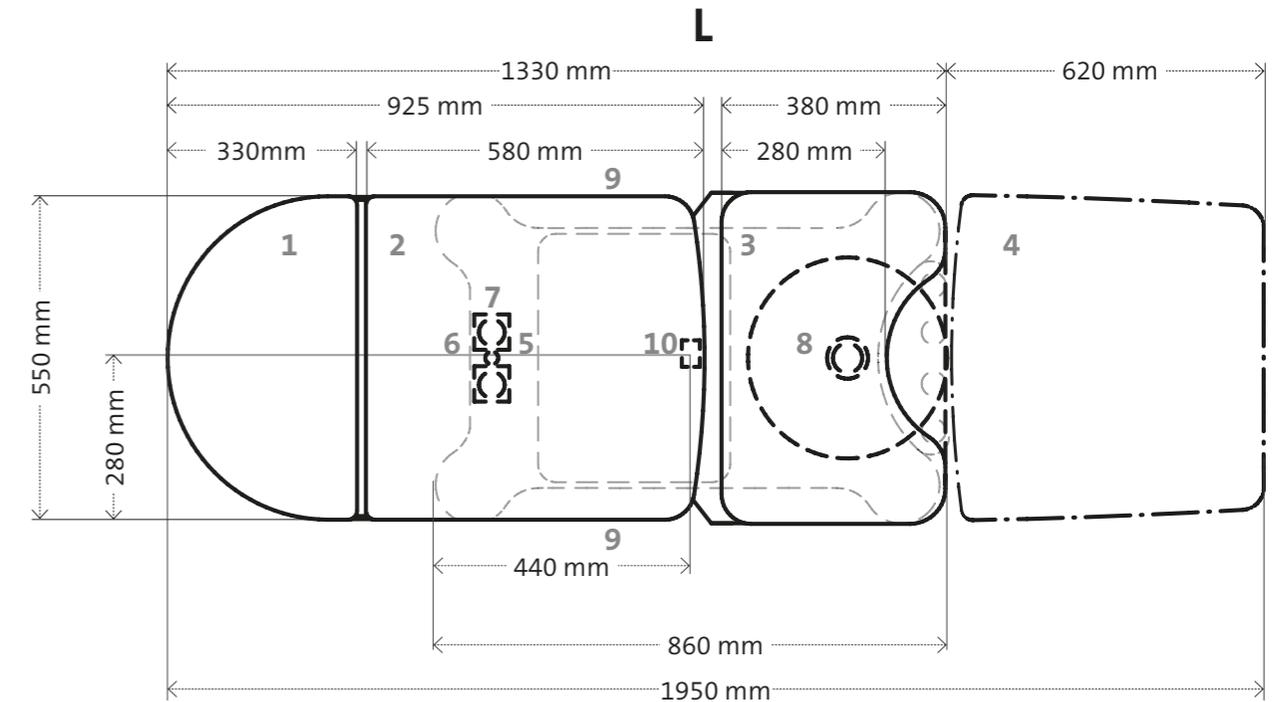

R

1.	Appui-tête	7.	Sortie câble de raccordement au réseau
2.	Dossier	8.	Système de rinçage (accessoire 91706)
3.	Section pelvienne	9.	Raccordement d'eau en Ø 1/2, standard à gauche
4.	Plateau de jambes (accessoire 400066)		Tuyau d'évacuation Ø 40 mm
5.	Liaison équipotentielle (accessoire 40678)	10.	Sortie de câbles pour la connexion sur le plancher
6.	Sortie câble de raccordement au réseau		

# Systemes de maintien pour les jambes



## Réf. 81726\_1

- Supports de pieds confort (paire) avec fonction poignée, avec revêtement en cuir synthétique, à fixer directement aux éléments crantés du Table
- Hauteur réglable en continu d'une seule main, avec assistance par vérin pneumatique
  - Pivotant latéralement
  - Plaques de pied en mousse polyuréthane grise
  - Pas en combinaison avec les articles 81072 et 82347\_Système



## Réf. 81717

- Appui-jambes de Goepel (paire), avec fonction poignée, avec revêtement en cuir synthétique, à fixer directement aux éléments crantés du Table
- Réglage de la hauteur et pivotant
  - Coquille d'appui-jambes confort en mousse de polyuréthane grise
  - Ajustement continu des coquilles d'appui-jambes sur rotule
  - Adapté pour réglage électrique (400570)



## Réf. 81726\_2

- Supports de pieds (paire) avec fonction poignée intégrée, avec revêtement en cuir synthétique, à fixer directement aux éléments crantés du Table
- Réglage de la hauteur par crémaillère sur le Table
  - Pivotant latéralement
  - Plaques de pied en mousse polyuréthane grise
  - Adapté pour réglage électrique (400570)



## Réf. 81705

- Appui-jambes de Goepel Confort avec coquille d'appui-jambes en mousse de polyuréthane grise (paire)

## Réf. 85223

- Rails latéraux à fixer sur la section pelvienne, pour montage d'accessoires (paire), L = 320 mm, obligatoire uniquement pour les articles 81705, 81700 et 81650

## Réf. 81500

- Étau, pivotant en inox, pour fixation sur rail (paire)

# Systemes de maintien pour les jambes



**Réf. 81700**

Appui-jambes de Goepel Classic avec coquille d'appui-jambes en mousse de polyuréthane noire (paire)

**Réf. 81710**

Supplément pour revêtement de la coquille d'appui-jambes (uniquement 81700) en cuir synthétique dans la couleur du matelas (paire)



**Réf. 400076**

Plateau de jambes à fixation rapide pour position allongée du patient

- Plateau de jambes entièrement escamotable sous le siège
- Développement de la surface du Table en une surface de couchage jusqu'à 1670 mm
- Pas en combinaison avec les articles 400066, 91706 et 91767



**Réf. 81650**

Supports de talon, en acier inoxydable, pour fixation sur rail latéral, sans étaux, paire



**Réf. 400066**

Plateau de jambes pour position allongée du patient

- Plateau de jambes adaptable sur support sous le siège
- Développement de la surface du Table en une surface de couchage jusqu'à 1950 mm
- Pas en combinaison avec l'article 400076

# Accessoires urologiques



**Réf. 91706**

Bassin à système de lavage gyroscopique (ø 320 mm) en acier inoxydable, avec siphon et accès d'inspection, avec arrivée et évacuation d'eau, arrivée d'eau par commande au pied électromagnétique, pas en combinaison avec l'article 91762

**Réf. 91707**

Crépine de réception à insérer dans le bassin de lavage

**Réf. 91716**

Support latéral pour bassin de lavage ou Uroflow-System



**Réf. 91760**

Support de dispositif pour examen urodynamique, Albyn Medical „Smartdyn“, à fixer sur un rail

**Réf. 91762**

Support pour Uroflow-System, avec système d'accrochage au table, pas en combinaison avec les articles 91706, 91617, 400076 et 81072\_200

**Réf. 91763**

Identique au modèle 91762, mais peut être combiné avec l'article 91706 ou 91617



**Réf. 91617**

Bassin inox (ø 320 mm), avec évacuation et tuyau d'écoulement, pas en combinaison avec l'article 91762

**Réf. 91608**

Seau en acier inoxydable 18/8, capacité 12 litres, avec couvercle

**Réf. 91766**

Coussin de rallongement du siège pour l'urodynamique, dimensions L x l = 170 x 150 mm, pas en combinaison avec l'article 400076



**Réf. 91765**

Coussin du siège pour urodynamique

**Réf. 91767**

Goulotte d'écoulement des fluides en acier inox, pas en combinaison avec l'article 400076

# Accessoires généraux



**Réf. 40677**

Prise de courant sur le socle, 2 pièces (pas de montage ultérieur)



**Réf. 40678**

Prise de liaison équipotentielle sur le socle (pas de montage ultérieur)

**Réf. 40018**

Support pour les pieds du médecin en inox, pas en combinaison avec les articles 81047\_200, 91762 et 91763



**Réf. 40898**

Mobilité pour Table d'examen, comprenant 4 roulettes doubles antistatiques,  $\phi=75$  mm, avec blocage, dispositif non adapté au transport de patients

**Réf. 40046**

Télécommande pour le réglage de la hauteur, de la section pelvienne et du dossier (seulement pour le modèle 400520, pas de montage ultérieur)



**Réf. 42000**

Revêtement de la colonne en acier inoxydable poli




**Réf. 40000**

Supplément pour revêtement laqué du socle selon le nuancier RAL

**Réf. 41000**

Supplément pour la peinture laquée du revêtement de la colonne selon le nuancier RAL

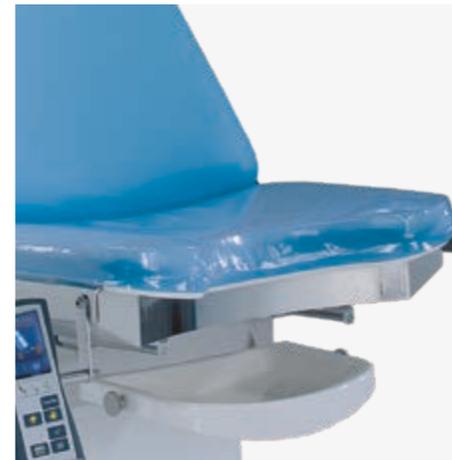

**Réf. 40020**

Protection PVC pour la section pelvienne



**Réf. 85222**

Rails latéraux à fixer sur le dossier, pour montage d'accessoires (paire), L = 600 mm

**Réf. 85223**

Rails latéraux à fixer sur la section pelvienne, pour montage d'accessoires (paire), L = 320 mm, obligatoire uniquement pour les articles 81705, 81700 et 81650

# Accessoires généraux



**Réf. 81043**

Cuvette de dépôt inox, dimensions L x l x H: 325 x 265 x 65 mm

**Réf. 81044**

Identique au modèle 81043 mais dimensions L x l x H: 325 x 176 x 65 mm

**Réf. 28530**

Poignées, blanches RAL 9010 (paire)


**Réf. 28531**

Supplément pour revêtement des poignées en cuir synthétique dans la couleur du matelas (paire)



**Réf. 40023**

Coussin pour la tête, avec fixation magnétique à l'appui-tête et au dossier

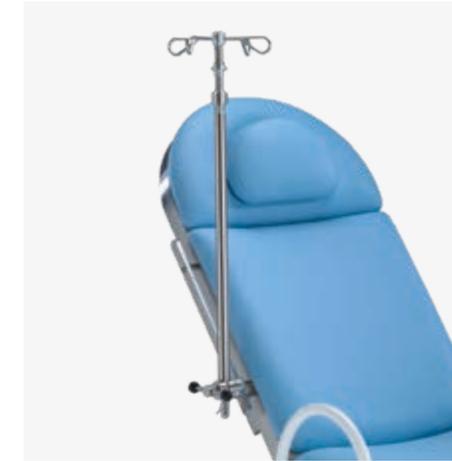

**Réf. 81805**

Potence à perfusion à fixer sur un rail, inox, avec étau pivotant



**Réf. 61211**

Appui-bras, pivotant et basculant par rotule, réglable en hauteur et à l'horizontale, matelas antistatique, incluant fixation au rail et sangle de fixation, dimensions (matelas): L x l x h = 400 x 115 x 40 mm



**Réf. 40220**

Appui-bras, pivotant, en même couleur que le Table, dimensions (matelas): L x l = 600 x 165 mm



**Réf. 40070**

Fixation murale en inox pour stocker les supports de pieds, les appui-jambes, plaques jambières et accessoires qui s'accrochent à un rail (25x10 mm), dimensions (L x l x H): 220 x 600 x 50 mm



# Accessoires généraux



## Réf. 82348

Lampe d'examen à fixer au support 82349\_1, 82349\_2 ou 82349\_3

- Technologie LED (40'000 lx / 0.5 m)
- Champ éclairé 180 mm
- Rendu des couleurs précis Ra >93
- Teintes de lumière 3300 K, 3800 K ou 4400 K
- Intensité lumineuse variable sur 5 niveaux
- Interrupteur sur la tête de la lampe
- Bras flexible à réglage continu
- Faible dégagement de chaleur dans la lumière



## Réf. 82349\_1

Support de lampe du côté droit

## Réf. 82349\_2

Support de lampe du côté gauche

## Réf. 82349\_3

Support de lampe pour table d'examen avec colposcope, du côté droit ou gauche

# Tabourets



## Réf. 206020

Tabouret d'examen à roulettes, base à 5 branches en aluminium, polie, roulettes doubles  $\varnothing$  65 mm (antistatiques), hauteur réglable de 450 à 580 mm par vérin pneumatique, à l'aide d'un levier situé sous le coussin du siège, dimensions:  
 $\varnothing$  siège 360 mm,  
épaisseur du coussin = 70 mm,  
 $\varnothing$  encombrement = 600 mm

# Tabourets



## Réf. 206045

Tabouret d'examen à roulettes, avec siège concave, base à 5 branches en aluminium, polie, roulettes doubles  $\varnothing$  65 mm, hauteur réglable de 450 à 580 mm par vérin pneumatique, à l'aide d'un levier situé sous le coussin du siège, avec anneau repose-pieds, dimensions:

$\varnothing$  siège concave = 400 mm,  
épaisseur du coussin 70 mm,  
 $\varnothing$  encombrement = 600 mm

# medifa

**medifa**  
the medical factory

**medifa healthcare group rassemble sous une même entité toutes les compétences en matière de salle d'opération.**

medifa est un fournisseur de solutions technologiques médicales complètes, géré par son propriétaire et actif dans le monde entier.

La gamme de produits et de services couvre la gamme complète des systèmes modulaires de cloisons, portes, plafonds et armoires (RooSy® Room Systems) pour salles d'opération clés en main, ainsi que les tables d'opération mobiles avec accessoires et éclairages opératoires jusqu'aux tables et mobilier pour examens. L'un des plus grands fournisseurs « Fabricant

d'Équipement d'Origine » allemands dans le secteur de la technique médicale fait également partie de medifa.

Dans ce groupe, nous retrouvons medifa GmbH & Co. KG à Finnentrop (tables d'opération), medifa hygienic rooms GmbH à Ötigheim (systèmes d'aménagement modulaire) et medifa metall und medizintechnik GmbH (composants de table d'opération) à Rastatt. Le groupe medifa healthcare emploie environ 350 personnes sur trois sites en Allemagne.


La planification, l'ingénierie et la fabrication sont entièrement effectuées en Allemagne. Sa valeur ajoutée de plus de 90 % rend le groupe pratiquement indépendant des fournisseurs tiers.

Sous la devise „we care“, medifa entend l'orientation cohérente suivant les besoins de ses clients. Les clients du monde entier peuvent compter sur un conseil, un traitement et une qualité de premier ordre d'une seule main, fabriqués en Allemagne selon des normes de qualité nationales et internationales certifiées.

## Produits

- Systèmes de salles d'opération modulaires: Plafonds, portes, murs, armoires (RooSy)
- Tables d'opération mobiles et accessoires
- Éclairages opératoires
- Tables d'examen et de traitement
- Mobilier et chariots médicaux fonctionnels
- Solutions de conceptions spéciales

## medifa dans le monde

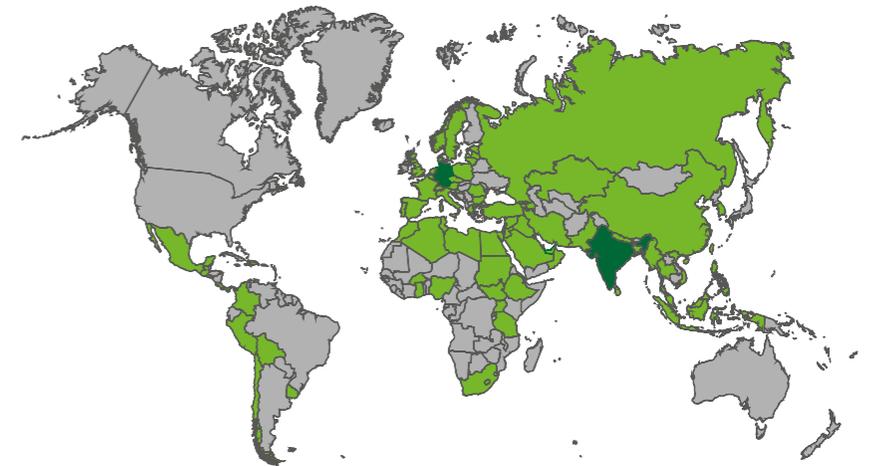

we care.



Version 02-19-FR  
Sous réserves de modifications.

[www.medifa.com](http://www.medifa.com)

we care. Code



**SYSTEM MED**

Parc Urbain Est  
105, rue Alexandre Dumas  
69120 Vaulx en Velin  
tel. 04 78 89 71 43  
fax 04 78 89 65 40  
[info@system-med.fr](mailto:info@system-med.fr)



**medifa GmbH & Co. KG**

Industriestraße 5  
57413 Finnentrop  
Germany  
fon +49 2721 71 77 -0  
fax +49 2721 71 77 -255  
[info@medifa.com](mailto:info@medifa.com)

we care.